



Förvaring och giltighet:

Produkten ska förvaras i en obruten förpackning i en temperatur mellan 2-30C. Frys inte produkten och håll den borta från direkt solljus, fukt och värme. Utgångsdatumet och giltigheten är preliminärt 24 månader efter tillverkningsdatumet.

Korrekt provtagning- och beredningsmetod måste följas. Inga andra enheter än de som medföljer i förpackningen ska användas till denna analys. Nytaget saliv ska bearbetas så fort som möjligt. Otillräcklig provtagning, felaktig hantering av prov kan ge ett ogiltigt resultat.

Utförande av test


Steg 1

Placera tungan mot gommen för att öka produktion av saliv, slappna av i dina kinder och massera kinderna försiktigt med fingrarna i 15-30 sekunder. Harkla dig så att du också får upp saliv från nedre delen av svaljet. Öppna uppsamlingspåse för saliven och spotta i uppsamlingspåsen.



Steg 2

Ta bort det blå locket på extraktionsröret. Håll pipetten vertikalt och sug upp saliven från uppsamlingspåsen. Överför tre (3) droppar av det uppsamlade saliven till extraktionsröret.

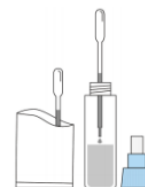


Steg 3

Kassera uppsamlingspåsen med kvarvarande saliven på ett säkert ställe.


Steg 4

Använd samma pipett för att blanda vätskan fem (5) varv i extraktionsröret. Efter du blandat fem (5) varv, för över allt saliv inuti pipetten till extraktionsröret.

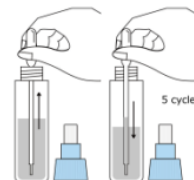

Steg 5

Återslut det blå locket på extraktionsröret. Skaka om röret så att vätskan blandas ordentligt. OBS Den behandlade provlösningen ska användas inom 5 minuter och ska inte förvaras.

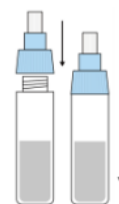


Steg 6

Riv av foliepåsen, ta ut testkassetten och placera den på en ren och plan yta framför dig.

Steg 7

Ta bort munstyckeskåpan som sitter på det blå locket på extraktionsröret. Pressa försiktigt in tre (3) droppar i utrymmet med ett "S" bredvid i testkassetten.

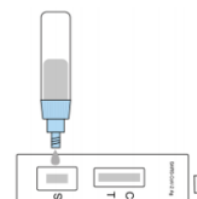

Steg 8

Läs testresultaten. Se bild till höger för att utläsa testresultat.

