



**Topsfritt**

**Enkelt  
Pålitligt  
Snabbtest.**

PRODUCED BY:  
**ÆGIRBIO**



**SWEDEN  
SAFE** 



# Pro 25-pack Test kit

Viraspec™ är ett salivbaserat snabbtest utvecklat i Sverige - som är snabbt, enkelt och praktiskt att använda. En reagenssticka reagerar på saliven. Svar erhålles efter 5-15 minuter om man är smittad eller ej.

CE-godkänt snabbtest för professionell in vitro-diagnostik. Avsett för professionell användning. Företaget skall utse person som ansvarar för att testning sker på korrekt sätt enligt tillverkarens manual och FHM´s rekommendationer. För effektivt resultat rekommenderas tester ett par gånger i veckan.

**Snabbtest  
COVID-19  
salivtest**





# Topsfritt snabbtest

- Kollegor eller kunder
- Studenter för klasser
- Spelare för matcher
- Flyg- och båtpassagerare
- Akutmottagningar

## COVID-19 (SARS-COV-2) SALIVTEST

Viraspec™ är ett salivbaserat snabbtest som är snabbt, enkelt och praktiskt att använda. En reagenssticka reagerar på saliven. Svar erhålles efter 5-15 minuter om man är smittad eller ej. För effektivt resultat rekommenderas tester ett par gånger i veckan.

Viraspec™ har en hög träffsäkerhet, som snabbt bidrar till att bryta eventuella smittvägar i organisationen på ett effektivt sätt och att verksamheten fortsatt kan bedrivas tryggt och säkert.

## ÆGIRBIO

Aegirbio är ett svenskt börsnoterat diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel.

Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel. "One size fits all" resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laborietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC ("Point-of-care") för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON ("Point-of-need") test för hemmabruk.



## PRO TEST KIT INKLUDERAR

25 Individuella testkassetter

25 Insamlingsrör

25 Extraktionsbuffertrör

25 Salivinsamlare

1 Arbetsstation

1 Manual

### MANUALER



ENGLISH



SVENSKA



DEUTCHE



ITALIANO



### NEGATIVE

A negative specimen will give a single pink coloured Control Line in the top half of the window, indicating a negative result. This Control Line means that the detection part of the test was done correctly, but no COVID-19 antigen was detected.




### POSITIVE

A positive specimen will give two pink coloured lines. This means that COVID-19 antigen was detected. Specimens with low levels of antigen may give a faint Test Line. Any visible pink coloured line is positive.



### INVALID

If no lines are seen or if just the Test Line is seen, the assay is invalid. Invalid tests should be repeated.

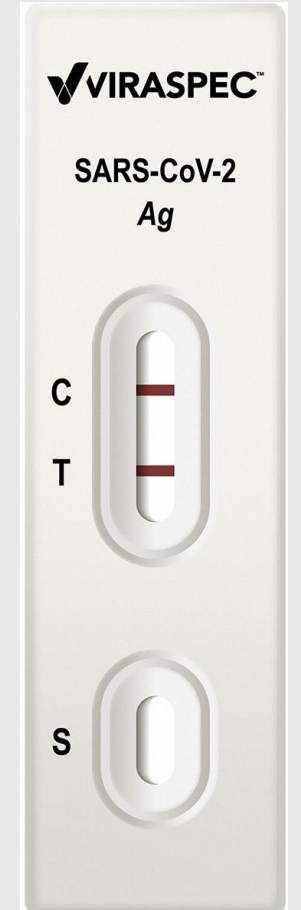





Safe Sweden Nordic AB levererar säkerhetsprodukter till myndigheter, regioner, kommuner och privata företag.

Sedan starten av pandemin har vi fokuserat på marknaden för Covidprodukter. Vi har nära samarbete med fabriker och distributörer både i Sverige och övriga världen. Vi lägger stor vikt på att samtliga av våra produkter är CE-märkta och produceras på kontrollerade fabriker.

**Försäljning:**

[mail@swedensafe.com](mailto:mail@swedensafe.com)

0771-210 900

[www.swedensafe.com](http://www.swedensafe.com)

Safe Sweden Nordic AB  
Arenatorget 2-6  
222 28 LUND

559256-6359

